

# Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Cassette (Swab)


Test rapido immunocromatografico per la rilevazione qualitativa dell'antigene SARS-CoV-2 in campioni umani da tampone rino/orofaringeo.



**| TESTARE**

**| TRACCIARE**

**| TRATTARE**

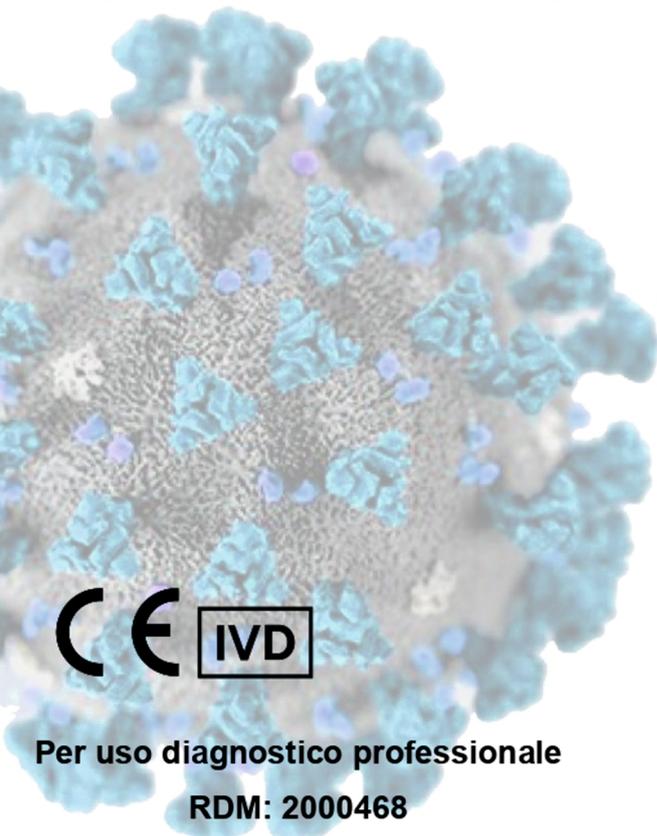

**Completo:** Tampone oro/rinofaringeo.

**Rapido:** Risultati in 10-20 minuti.


**Pratico:** Adatto a screening ad elevata intensità, senza l'impiego di strumentazione.



Per uso diagnostico professionale

RDM: 2000468

## RACCOLTA DEL CAMPIONE:

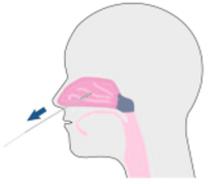


**Tampone rinofaringeo:** inclinare leggermente la testa ed inserire lentamente il tampone nella narice fino al raggiungimento della parete nasofaringea. Ruotare delicatamente il tampone per 3-4 volte e poi rimuoverlo.



**Tampone orofaringeo:** inclinare leggermente la testa e spalancare la bocca. Inserire il tampone fino a toccare la parete della faringe posteriore, strofinare 2-3 volte ed estrarlo.

## PROCEDIMENTO DEL TEST:

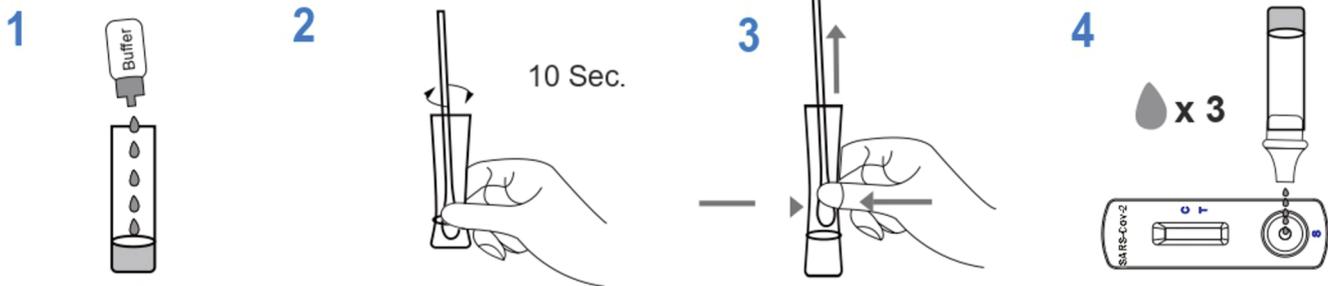

### Lettura dei risultati:




15 min



Positivo



Negativo

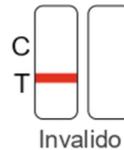

Invalido

## PERFORMANCE:

Procedimento	RT-PCR		Risultati Totali
	Risultati		
Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test (Swab)	Positivi	56	56
	Negativi	6	206
Risultati Totali		62	262

**Sensibilità : 90,32%**

**Specificità 99,02%**

**Accuratezza: 97,71%**

Nome prodotto	Codice	Unità box	Conservazione
Novel Coronavirus (SARS-COV-2) Antigen Rapid Test Cassette (Swab)	K511416D	25 Test/kit	2-30C

